

Paraffin-/silikonfrei

## Instru GeL

Medizinisches Gleitgel für die  
Endoskopie

### Präparate Typ:

**INSTRUGEL** ist ein *unsteriles*, hochreines, Paraffin- und silikonfreies medizinisches Gleitgel für die Endoskopie. **INSTRUGEL** erleichtert Untersuchungen, insbesondere mit flexiblen Endoskopen und bei der Koloskopie. **INSTRUGEL** ist Paraffin- und silikonfrei, schont die Endoskope, ist physiologisch unbedenklich und gut schleimhautverträglich.

**INSTRUGEL** ist *kein* Anästhetikum und *kein* Arzneimittel. **INSTRUGEL** ist ein Medizinprodukt. – PZN 183 134 03 -

### Präparate Eigenschaften:

- physiologisch unbedenklich,
- fett-, paraffin- und silikonfrei,
- gute Gleitwirkung,
- sehr gut materialverträglich,
- sehr gut wasserlöslich,
- glas-/wasserklar,
- gut schleimhautverträglich,
- ohne pharmakologische Wirkstoffe
- *unsteril*

### Anwendungsbereich:

Für *vorübergehende* endoskopische Untersuchungen auch durch *natürliche* Körperöffnungen in *besiedelten* Körperbereichen, wie der Koloskopie.

## Anwendung:

Je nach Bedarf auf dem Untersuchungsinstrument gleichmäßig verteilen.

*Achtung: Bei immungeschwächten Patienten, bei Patienten mit Vor- oder Mehrfacherkrankungen und/oder bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegenüber Konservierungsmitteln (Parabene) oder eines der Inhaltsstoffe vor Anwendung den behandelnden Arzt konsultieren.*

## Biokompatibilität, Haut- u. Schleimhautverträglichkeit:

Dermatologisch getestet: Dermatest, Münster, 2015

## Zusammensetzung:

- Gelbildner: Hochreine Cellulose,
- Feuchthaltemittel: Natürliches Glycerin,
- pH-Regulator: Milchsäure (Magrocol 3350),
- Konservierungsmittel: Parabene (Propyl-4-hydroxybenzoat, Methyl-4-hydroxybenzoat) Natriumbenzoat, Kaliumsorbat.

## Chemisch-physikalische Daten:

- Konsistenz: Viskoses Gel
- Farbe: Wasserklar
- Geruch: Neutral
- pH-Wert: ca. 6,5 (neutral)
- Löslich: Vollständig wasserlöslich

## Lieferform: CE

12 x 200-ml-Tuben

## Zur Beachtung u. Haltbarkeit:

- **Lagerung:** *Lagertemperaturen* über **Raumtemperatur** (20-25°) und direkte **Sonneneinstrahlung** vermeiden, von **Wärmequellen** (Heizung) fernhalten.
- **Tuben** nach Anwendung **sicher verschließen**.
- **Haltbarkeit** (*ungeöffnet*): siehe Tubenfalz, **Haltbarkeit** (*nach Anbruch*): 6 Monate
- *Bei Empfindlichkeiten gegenüber einzelnen Wirkstoffen den Arzt konsultieren.*

## Hinweis:

Die Empfehlungen werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien nicht von einer eigenen Prüfung vor der beabsichtigten Anwendung.